

i-arm^{PAT.P}

取り付けマニュアル

■i-001(クリックイン)


■i-002(ボックス)

■iL-002(ボックス)




写真はi-001(クリックイン)

- ①.i-armを取り付けるにあたり、鼻盛り(パッド)が不必要ならニッパー等で切落として下さい。
- ②.切落とした後はヤスリやバフ等で仕上げして下さい。
- ③.i-armを埋め込む位置を確認して、千枚通し等でドリルの刃先を案内する目印を付けて下さい。
- ④.ドリルバイスにΦ1.5のドリルを取り付けます。写真の様に埋め込む部分と同じ長さ(約3mm)だけ出して下さい。

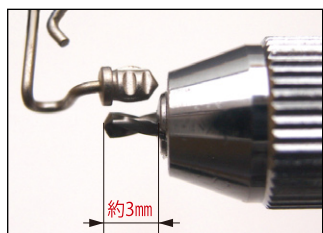


※取り付け部分の形状によっては**バイスの先端部がフレームの一部に干渉することがあります**ので、その場合ドリルを少し長目に出して穴の深さに十分注意してあけて下さい。


- ⑤.③で付けた目印にドリルバイスを垂直に立て、ブレないように下穴をあけて下さい。
- ⑥.写真の様に、専用取り付けヤットコのミゾにあわせて挟み込んで下さい。(左右は反転して挟んで下さい。)
 - ※L曲げタイプの場合は右下の写真のような一般的な平ヤットコで埋め込めます。

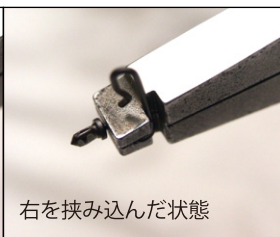

- ⑦.写真の様に、取り付けヤットコを下穴に対して垂直に立て、鼻パッドが設定位置にくるように取り付け角度を確認して、一息で押し込んで下さい。※回しながらの押し込みは絶対にしないで下さい。

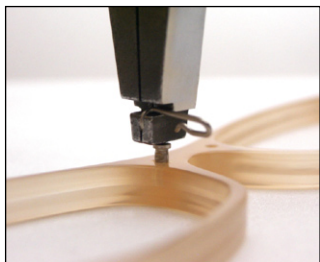

iL-002
(L曲げタイプ)

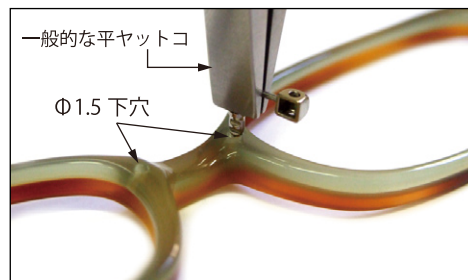

- ⑧.反対側も⑦と同様に押し込んで取り付けして下さい。
- ⑨.i-armの取り付けが終わったら、専用パッドを装着して下さい。
- ⑩.最後に左右のパッドの開きや傾斜をフィッティングで再確認して下さい。